



karadabeat
manual ver.1.1

【お問合せ】

karadabeat ユーザー様問合せ先：

karadabeat コンタクトセンター karadabeat@cc.mti.co.jp 土日祝日を除く 9:00-17:30

※@cc.mti.co.jp を受信可能な状態でお問合せください。

※アプリ経由での問合せの場合は、以下フローよりお願いいたします。



【karadabeat インストール方法】

- ・ App Store より、「karadabeat」「カラダビート」などで検索してください。
- ・ <https://itunes.apple.com/jp/app/karadabeat/id688179225> よりアクセスしてください。

【karadafit Heart 接続方法】

1. 「karadafit Heart」に同梱されている取扱説明書の「使い方」1～4項を参照し、正しく身体に装着してください。

※「karadafit Heart」はiPhoneの「設定」内「Bluetooth」からではなく、「karadabeat」アプリ内から連携頂く必要がございます。また、直接肌に装着する必要がございます。

karadafit Heart
カラダフィット ハート
取扱説明書

■お買い上げいただきありがとうございます。
■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

※ 記載されている仕様、デザインは、改訂等のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ Karadafitのトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、フィジオステック(株)は、Bluetooth SIGに準拠して使用しています。
※ その他のお名前、製品名などの名称は、各社の登録商標または商標です。
※ 過剰のご使用において、心拍一測定が短縮した場合は、保証規定によりお買い上げ後、3年間は無償修理または交換いたします。

各部の名称

● センサー (送信機)
・正面図
・背面図

1. ストラップ取り付け左右表示
2. バッテリーカバー (対応電池: 3V CR 2032)

● ストラップ

1. 電極
2. センサー (送信機) 取付ボタン

使い方

1 下図のように電極を濡らします。

2 センサーをストラップに取り付けます。

3 胸の少し下でストラップを回し両側のクリップを留めます。正確な心拍データを取るため、ストラップを胸に両側のクリップを留めます。正確な心拍データを取るため、ストラップを締めつけすぎたり緩すぎたりしないよう調整をしてください。

4 電極が肌に密着するようにして、センサーが身体の中央に来るように位置を調整します。

電池の取り出し方・入れ方

1 センサーをストラップから取り外します。

2 コインで蓋を押し背面のバッテリーカバーを開きます。

3 使用済みの電池を取り出して、新品の電池と交換します。

4 バッテリーカバーを元に戻し、ストラップに取り付けます。

注意: 水が浸入しないように背面バッテリーカバーはしっかりと閉めてください。

警告:

1. センサーやストラップを洗濯機や乾燥機に入れてはいけません。
2. センサー部分は水洗いできません。ストラップ部分は手洗い可能ですので、手洗います場合はセンサーを必ず取り外し、下記洗濯表示の通り行ってください。

洗濯表示

☞: 水温は30度以下とします。
☞ ☞: アイロンがけ、漂白剤の使用、乾燥機の利用は禁止です。

アプリについて

■ご利用にはアプリのダウンロードが必要となります。

1 「karadabeat」アプリをダウンロード
QRコードからアクセスするか、App Storeにアクセスして「karadabeat」を検索ダウンロードしてください。


2 アプリを起動
アプリの指示にしたがって、機器の設定をしてください。

必須環境: iPhone4s以降、iOS6.0以上

他 iPhoneアプリのフィットネスサービスと連携します。(BluetoothSMART連携しているものに限る)

● 無料で仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
● 取扱環境であってもおお客様の環境によっては正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承下さい。

2. iPhone 端末より「karadabeat」アプリを起動する。

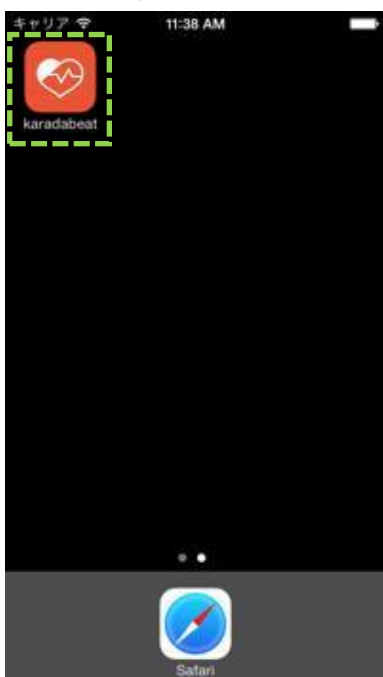

3. (インターネットが繋がっていて、過去ログイン実施済みの場合は次の画面に遷移します)
 「ログインする」をタップし、karadabeat のメールアドレスとパスワードを入力します。その後プロフィールを入力しますが、ここでは”生年月日””性別”のみ必須項目となります。※他項目は任意




4. アプリが立ち上がると以下の画面が表示されます。



5. 画面のハートマーク付近をタップすると、初回操作時のみ以下の画面に遷移します)



6. 心拍数計が装着されていることを確認し、ハートマークをタップすると心拍数計と連携します。

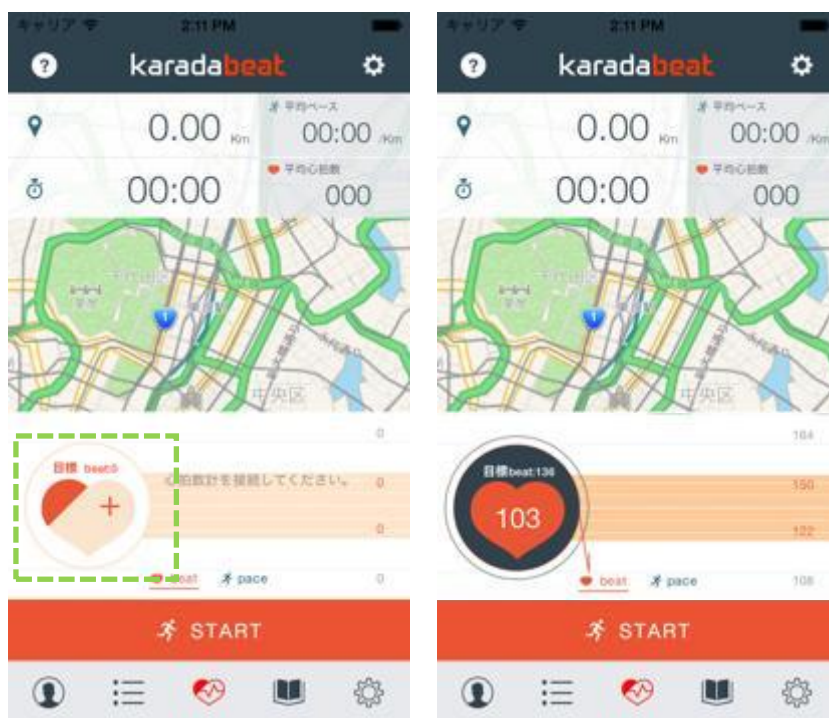

上記を実施して連携ができない場合は、

[iPhone もホームボタンを 2 回押す] -> [karadabeat のアプリが起動されているのを一度落とす(アプリを削除することとは別)です] -> [iPhone を再起動する] -> [iPhone の設定画面で Bluetooth を一度 OFF にし、再度 ON にする] -> [karadabeat を起動し、karadafit Heart と連携する] を実行してください。

【パスワードを忘れてログインできない場合 ①】

暫定対応として、アプリを再起動することによりログインできる場合がございます。

1. iPhone のホームボタンを 2 回連続押下してください。横にスクロールして「karadabeat」を探しだし、上部にスクロールしてアプリ自体を落としてください。



2. インターネットに接続されていることを確認し、再度アプリを立ち上げてください。
過去ログインが成功している場合は、自動ログインします。


自動ログインしない場合は「ユーザー様がパスワードを忘れてログインできない場合 ②」にてパスワードのへ腦をお願いします。

【ユーザー様がパスワードを忘れてログインできない場合 ②】


1. パスワードを再設定するため下記のスタート画面を表示させます。
ログインしてしまっている場合は、設定画面最下部より「ログアウト」をタップしてください。



2. 「ログインする」をタップし、「パスワードを忘れた方はこちら」をタップします。

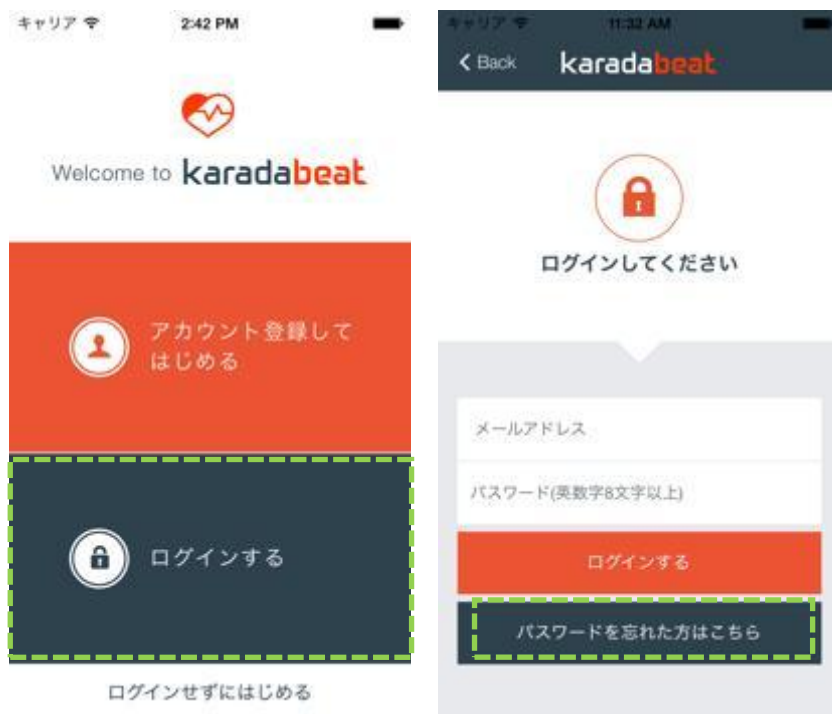

3. karadabeat に登録されたメールアドレスを入力し、「メール送信」をタップしてください。

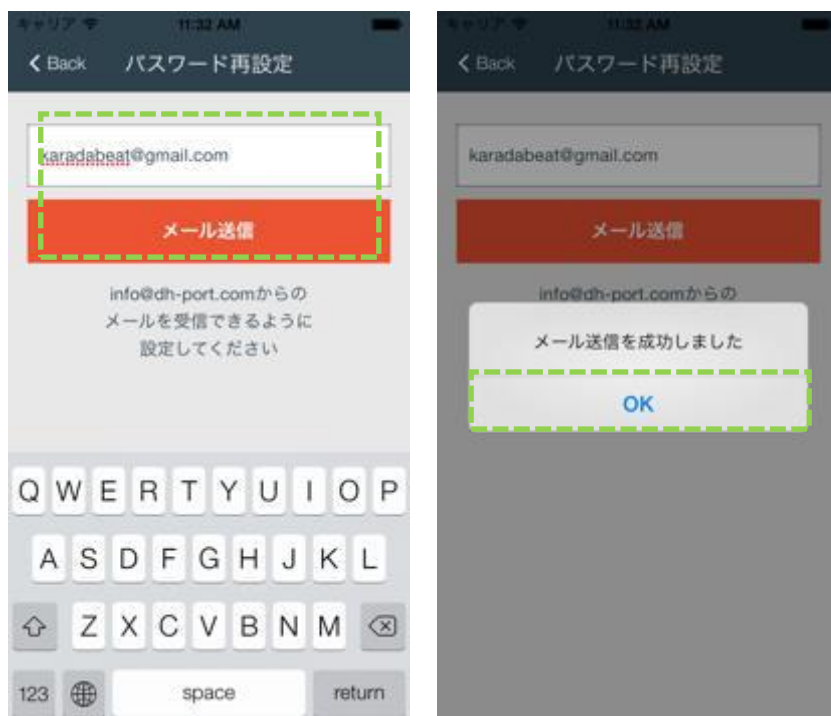

4. iPhone のホームボタンをタップして、メーラーを開きます。URL をタップすると、Safari が起動します。



5. 新しいパスワードを2か所に入れて、変更ボタンを押してください。



6. パスワードが変更されました。アプリを起動するボタンを押し、スタート画面「ログインする」より、メールアドレスとパスワードを入力してください。




【1年 PREMIUM 会員様 池の平ホテル宿泊券特典表示方法】

1年 PREMIUM4200 円課金ユーザー様


1. iPhone 端末より「karadabeat」アプリを起動してください。



2. (インターネットが繋がっていて、過去ログインをしていた場合は次の画面に遷移します)
「ログインする」をタップし、karadabeat のメールアドレスとパスワードを入力します。その後プロフィールを入力しますが、ここでは”生年月日””性別”のみ必須項目となります。※他項目は任意

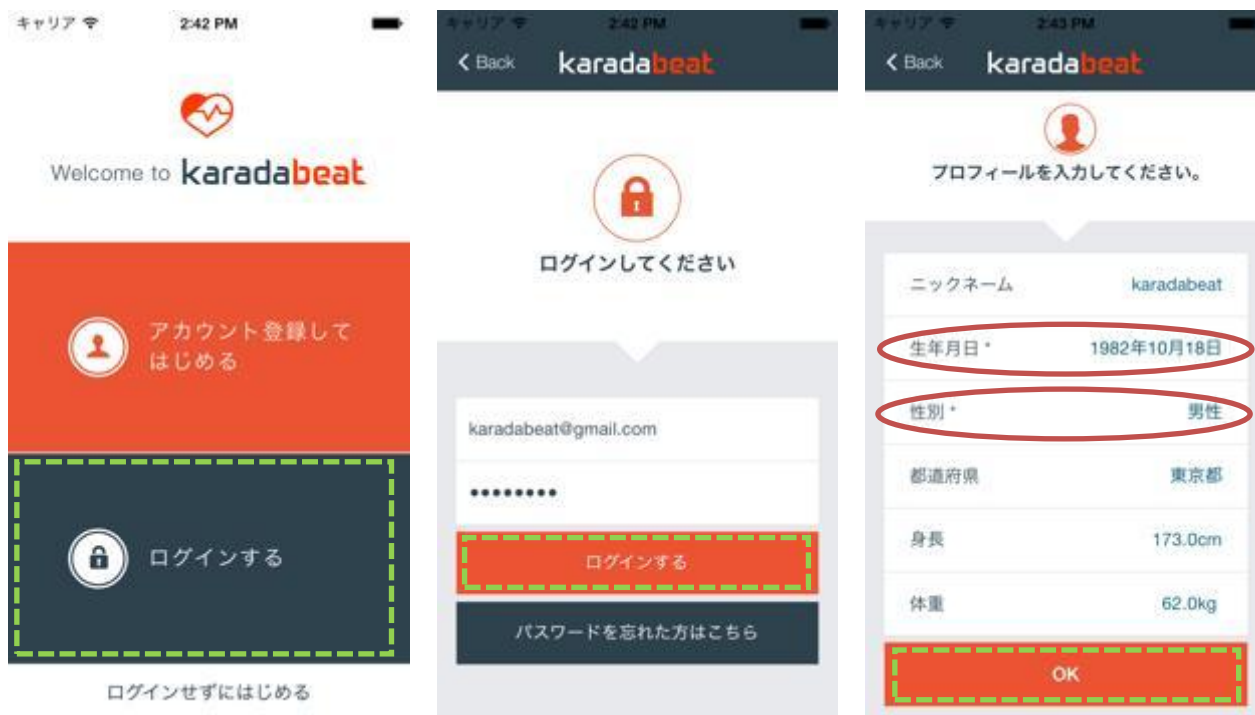

3. アプリが立ち上がった後に、右下の「設定ボタン」をタップする。続いてアカウントの「PREMIUM機能」をタップしてください。 ※インターネットの接続が必須です。

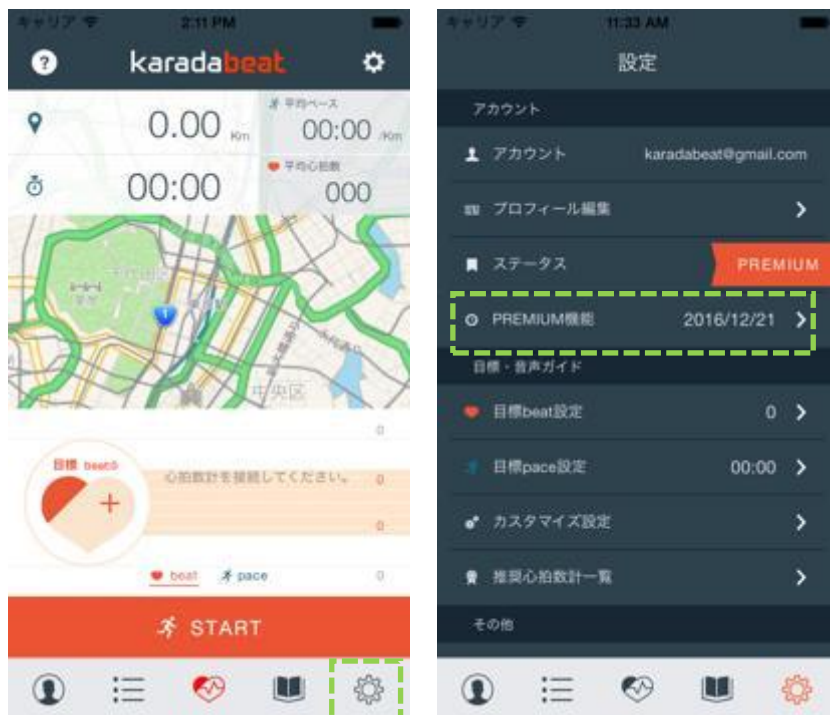

4. 画面が表示され、PREMIUM GOLDのSTATUSになっていれば宿泊券が発行されている証拠となります。最下段までスクロールし、karadabeat公式H.P.の画像をタップしてください。



- Safari が起動し、<http://pc.karadabeat.jp/> の画面が表示されます。上部にある PREMIUM 特典のボタンをタップしてください。



- (事前にログイン済みの場合は、このページが表示されず次の画面が表示されます) ログイン画面が出てきます。karadabeat で利用しているメールアドレスとパスワードを入れてください。



7. 「池の平ホテル宿泊・健康プログラム受講券」の画面に宿泊券が表示されています。宿泊券周辺をタップしてください。



8. 宿泊券の画面に「MTI-014081(仮：会員様毎により番号が異なります)」が表示されます。こちらの番号は予約時に必要となりますので、予約時にお伝えください。

